

添付文書

2026 年 4 月作成(第 3 版)

医療機器届出番号：13B2X10341000001

機械器具 4 8 注射筒

一般医療機器 家庭用精液注入用シリンジ

(汎用注射筒 13929001)

シードイン


【禁忌・禁止】再使用禁止（本品及び付属品とも）

【形状・構造及び原理等】

<構成>

本品は、カテーテルとシリンジを組み合わせた組合せ医療機器である。本品は付属品として採精容器を含む。

<形状・構造>

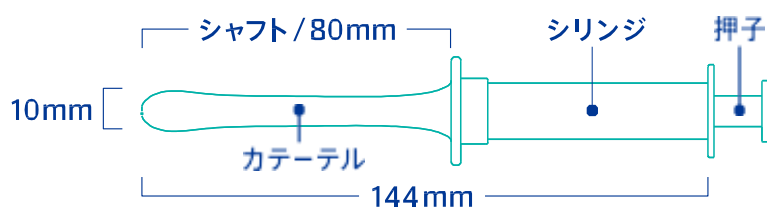

<原理>

予め採取された精液を、カテーテルが接続されたシリンジ内に吸引し、カテーテル部分を腔内に挿入した後、シリンジの押子を押す、シリンジ内の精液をカテーテル先端の開口部より腔内に注入する。

<原材料>

カテーテル：シリコーンゴム、シリンジ：ポリプロピレン、採精容器：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

本品は、家庭において、シリンジ法にて精子を腔内に挿入するために用いる シリンジ型の製品をいう。本品は単回使用である。

<使用方法>

①



製品が包装されたアルミパウチを、切り取りガイド（図中➡）から用手的に開封する。

②



アルミパウチから、カテーテルと採精容器を取り出す。

③



男性は、出来るだけ性器を清潔にし、採精容器に精液を採取する。

④




採精後、出来るだけ速やかにカテーテルの先端の開口部から、シリンジの押子を引き、採精容器内の精液をシリンジ内に吸い取る。

⑤



女性は安静な体位を取り、カテーテルを膣内に基部のブリム部（図中➡）まで差し込む。
シリンジの押子を止まるまで押し込み、精液を膣内に注入する。
注入後は、静かにカテーテルを抜き去る。

⑥

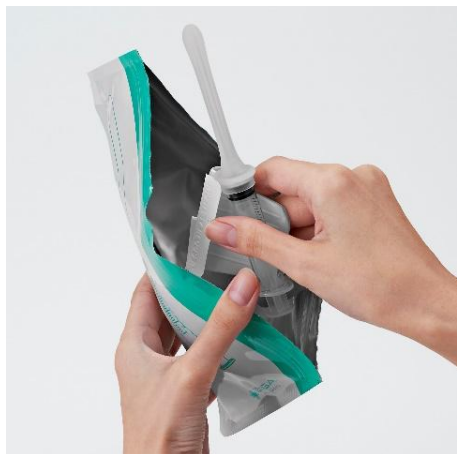

使用後のカテーテル、採精容器は、開封したアルミパウチに戻し、チャックを閉じ、廃棄する。

⑦



アルミパウチのチャックの閉じ方。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ①使用前に手指は清潔にすること。
- ②開封は使用直前に行うこと。
- ③万一、包装が破損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
- ④シリンジは本品に同封されたものを使用し、それ以外のシリンジをカテーテルと接続しないこと。カテーテルやシリンジの破損、怪我や精液注入失敗の原因となります。
- ⑤カテーテル、シリンジ及び採精容器は全て単回使用とし、再使用や複数人での使いまわしは絶対にしないこと。精液は採取後速やかに注入すること。カテーテルはシャフト部分を膣に挿入し、シャフト部分以外は膣に挿入しないこと。
- ⑧痛みを感じるときは無理に挿入せず使用を中止すること。使用中止後も痛みが続く場合は医師の診察を受けること。
- ⑨6 カ月連続で使用しても妊娠に至らない場合は医師の診察を受けること。
- ⑩器質性の不妊が疑われる場合は、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期限等】

＜保管方法＞

- ①直射日光や高温多湿を避け涼しい場所で保管すること。
- ②カテーテル、シリンジ及び採精容器は、包装を開封又は包装から出した状態で保管しないこと。
- ③本品は指示された方法で保管すること。[不適切な保管は製品の劣化や破損の原因となる。]

＜有効期間＞

使用期限をアルミパウチ袋の裏面右部に記載。（自己認証）

<廃棄方法>

使用後は各自治体のルールに従って捨てること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 TENGA

住所：〒104-0053 東京都中央区晴海 1-8-12 晴海トリトンスクエア Z 棟 11 階

TEL：0120-0721-38（平日 10:00-19:00）

Mail：contact@tenga.co.jp

●使用上の注意、重要な使用上の注意



SYR-01
シードイン

Seed in

一般名称	家庭用精液注入用シリンジ	医療機器の分類	一般医療機器
医療機器届出番号	13B2X10341000001		
製造販売元	株式会社 TENG		
お問い合わせ	株式会社 TENG 0120-0721-38 (平日 10:00-19:00)		

詳しい製品情報と
添付文書はこちら
からアクセスできます



【禁忌・禁止】再使用禁止(本品及び付属品とも)

ご使用方法



1

付属の採精容器を広げて、
精液を採取してください。



2

採取した精液を、カテーテルの
先端から吸引してください。



3

カテーテルを膈内に挿入し、
精液を注入します。
※注入後は5分程度横になって安静にしてください。



4

使用後は袋に入れて封をし、
廃棄してください。

ご使用のタイミング

排卵日の5日前～1日後の7日間がオススメの使用タイミングです。この期間に通常の
性行為と併用し、なるべく多くタイミングをとることを推奨しています。

5日前
4日前
3日前
2日前
1日前
排卵日
1日後

重要な基本的注意

①使用前に手指は清潔にすること。②開封は使用直前に行うこと。③万一、包装が破
損している場合、または製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
④シリンジは本品に同封されたものを使用し、それ以外のシリンジをカテーテルと接
続しないこと。カテーテルやシリンジの破損、怪我や精液注入失敗の原因となります。
⑤カテーテル、シリンジ及び採精容器は全て単回使用とし、再使用や複数人での使い
まわしは絶対にしないこと。⑥精液は採取後速やかに注入すること。⑦カテーテルは
シャフト部分を膈に挿入し、シャフト部分以外は膈に挿入しないこと。⑧痛みを感じる
ときは無理に挿入せず使用を中止すること。使用中止後も痛みが続く場合は医師の診
察を受けること。⑨6カ月連続で使用しても妊娠に至らない場合は医師の診察を受け
ること。⑩器質性の不妊が疑われる場合は、医師の診察を受けること。

<原材料>カテーテル:シリコーンゴム、シリンジ:ポリプロピレン、採精容器:ポリプロピレン
<保管方法>①直射日光や高温多湿を避け涼しい場所で保管すること。②カテーテル、シ
リンジ及び採精容器は、包装を開封した状態で保管しないこと。③本品は指示された方
法で保管すること ※不適切な保管は製品の劣化や破損の原因となります。
<廃棄方法>使用後は各自自治体のルールに従って捨てること。
<有効期限>右部に記載

Patent info: ipr.tenga.co

SYR01NNP02-11-2



4 589809 440270